

Assistência Técnica:

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu produto ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:

E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).

Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Características Técnicas:

Modelo: Central Jateamento Precision 3 Press Turbo

Peso líquido: 6,100 Kg

Peso bruto: 7,820 Kg

Capacidade da câmara de trabalho: 11L

Pressão de Uso: 80 à 100 libras / psi (0,55 a 0,69 Mpa) – (5.5 a 6.9 bar)

Fonte de Alimentação Bivolt Automático 100 - 240 VAC - 50/60Hz - 12v / 1 A

Iluminação LED: 90 Luminus

Tensão: Bivolt Automático 100 - 240VAC

Frequência: 50/60 Hz

Dimensões: 450 mm (comprimento), 380 mm (altura) e 450 mm (largura).

essencedental
a essência do sorriso

Consulte os vídeos de cada produto e seus benefícios em nosso site - www.essencedental.com.br

Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial
CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 . 16 . 3334.2000
e-mail: essencedental@essencedental.com.br | www.essencedental.com.br

essencedental
a essência do sorriso



**Central Jateamento Precision
3 Press Turbo**
Manual de Instruções

Aviso legal:

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento:

Parabéns, você acaba de adquirir **CENTRAL JATEAMENTO PRECISION 3 PRESS TURBO** da ESSENCE DENTAL.

Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

Aplicação:

- Usado na limpeza e jateamento de peças fundidas para melhorar e facilitar a aderência.
- Pode ser utilizado com óxido de alumínio, esfera de vidro ou areia especial:
- Micro retenção na superfície interna da peça a ser cimentada;
- Remoção de oxidação interna e externa de peça a ser recimentada;
- Remoção de cimentos provisórios e definitivos;
- Desengorduramento superficial da peça protética;
- Ajuste fino da área oclusal;
- Jateamento em cerâmica e cerâmica prensada;
- Limpeza de peça fundida em cromo cobalto.

Características e benefícios:

- Carenagem confeccionada em polietileno de alto impacto media densidade, não amarela, não resseca e não oxida, diferente do que ocorre com os gabinetes confeccionados em chapas de aço;

Termo de garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) meses, sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra. Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial válida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:

- Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
- O número de série no produto for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
- Na instalação do produto não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

Itens Excluídos de garantia:


- Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lamina de corte, entre outros que não caracterizam **defeito de fabricação**, independente do prazo de garantia.

Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Não liga o LED	Falta de energia	Verifique se na tomada tem energia.
		Se o equipamento está ligado na tomada.
	Chave desligada	Acione a chave liga/desliga
	LED ou Fonte queimado	Substituição à peça danificada ou procure uma assistência técnica credenciada.
	Chave desligada	Se a Fonte de alimentação do equipamento está ligado na tomada.
		Acione a chave liga/desliga
Não jateia	Rede de ar	Verifique se o equipamento está ligado na rede
		Verifique se tem ar comprimido na rede pneumática
	Umidade na rede de ar	Verifique se a rede pneumática está isenta de umidade e retire a umidade
	Acionamento pedal	Acione o pedal
	Válvula direcional está posicionada	Posicione a válvula na posição correta
	Sem oxido no reservatório	Verifique se tem oxido no reservatório e abasteça-o.
	Bico entupido	Dentro da carenagem use o bico de limpeza para dar um jato de ar dentro do bico da caneta, encostando ele no orifício do bico de metal duro e acionar o gatilho em um jato rápido
Desgaste pré-maturo dos bicos	Excesso de pressão no equipamento	Regule a pressão no filtro de ar
	Óxido fora de especificação	Coloque o oxido correto para cada bico
Dificuldade para enxergar peça no interior do equipamento	Visor desgastado	Trocar visor
Bico de ar para limpeza não funciona	Verifique se o equipamento está ligado na rede pneumática	Verifique se o equipamento está ligado na rede
		Verifique se tem ar comprimido na rede pneumática

- Possui 3 canetas (2 pressurizadas e 1 aspirada);
- Design revolucionário com entrada frontal para as mãos em ângulo e painel amplo com angulação de 45° facilitando a visualização da peça, proporcionando ao operador exercer postura correta, evitando assim a fadiga muscular;
- Aro de fixação das luvas, com facilidade de substituição das mesmas;
- Visor resinado para evitar ofuscamento;
- Possui ótima vedação do painel;
- Possui dois reservatórios pressurizados com capacidade para até 1,100 kg cada um;
- Possui uma válvula direcional interna seletora dos bicos jateadores;
- Chave liga/desliga com proteção para evitar que as partículas danifiquem a mesma;
- Possui filtro condensador de ar, evitando que ocorra umidade no elemento abrasivo;
- Possui válvula interna para regulação das canetas;
- Canetas desenvolvidas, com design moderno e ergonômico, para otimizar o trabalho do profissional. Pontas em carbeto de tungstênio garantindo maior durabilidade;
- Bivolt automático;
- Possui sistema de iluminação a LED;
- Possui conexão para acoplar o aspirador de pó na parte traseira do equipamento, eliminando a necessidade do uso de máscaras de proteção das vias respiratórias do operador;
- 12 meses de garantia para defeitos de fabricação;
- Baixo custo para peças de reposição.

Componentes:

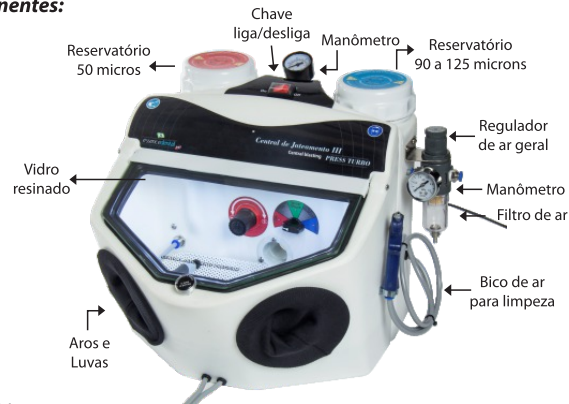



Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do equipamento. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

Instalação e uso inicial:

Instale a sua CENTRAL DE JATEAMENTO PRECISION 3 PRESS TURBO em uma base plana, nivelado, lisa (de modo que o equipamento fique estável para trabalhar) temperatura ambiente, ventilada, em altura adequada para o manuseio, a uma distância mínima de 40cm de fontes de calor e umidade.

Obs.: A Central de Jateamento Precision 3 Press Turbo é bivolt automática e não necessita de regulação de voltagem.

- 1º Passo:** Ligue o plug da fonte de alimentação 12v no conector do equipamento na parte de traz e a fonte em uma tomada na rede elétrica;
- 2º Passo:** Conecte a mangueira de entrada de ar na rede pneumática;
- 3º Passo:** Regule o filtro de ar para trabalhar entre 80 a 100 libras (0,55 a 0,68 Mpa) – (5.5 a 6.9 bar), puxando para cima e girando o regulador no sentido anti-horário (diminuir) e no sentido horário (aumentar) até chegar na pressão indicada para uso e pressione para baixo para travar o regulador.

Funcionamento:

1º Passo: Abra a tampa do reservatório girando sentido anti-horário, carregue

óxido até a marca indicada dentro do tanque, coloque nos respectivos reservatórios (segundo as especificações contidas nas tampas dos reservatórios), ou seja, reservatório lado esquerdo 50 microns e lado direito de 90 a 125 microns, tomando muito cuidado para que não caia óxido na rosca do tanque, feche bem o tanque girando a tampa em sentido horário;

2º Passo: Acione a chave liga/desliga para ligar a lâmpada;

3º Passo: Gire o botão da válvula acionadora para selecionar a caneta a ser utilizado;

4º Passo: Coloque a peça a ser trabalhada dentro do equipamento, retire a caneta selecionada do suporte e direcione sobre a peça;

5º Passo: Pressione o pedal para iniciar o jateamento.

Obs: Para a caneta fina e aconselhável usar uma pressão de 22 a 30 libras/psi (0,15 - 0,20 Mpa) (1,5 – 2,0 bar).

Conselhos:

- Esgote periodicamente o filtro de ar da rede e do equipamento;
- É indicado o uso filtro de ar na rede pneumática;
- Manter o equipamento longe de inflamáveis;
- Manter o equipamento, ao menos 40 cm de fontes de calor;
- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos;
- Desligue-o na chave e da rede elétrica quando não estiver em uso;
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho;
- Não tente transportar o equipamento sustentando-o pelo cabo de força;
- Para desligar da tomada, puxe pela fonte de alimentação e nunca pelo cabo.
- Nunca deixe o cabo encostar-se a superfícies quentes;
- Manter o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

Troca da Caneta:

1º Retirar a caneta: Segure a mangueira com uma mão e empurre o conector da carenagem do jato com a outra mão, em seguida puxe a mangueira para fora.

2º Colocar Caneta: Segure pela mangueira e enfie ela com força na conexão azul da carenagem.

Manutenção e Limpeza:

- Desligue o equipamento na chave e também da rede elétrica;
- Para realização da limpeza da carenagem, utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool;
- Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira.