

essencedental
a essência do sorriso

**Consulte os vídeos de cada produto e seus benefícios
em nosso site - www.essencedental.com.br**

Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial
CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 . 16 . 3334.2000
e-mail: essencedental@essencedental.com.br | www.essencedental.com.br

essencedental
a essência do sorriso



Aqua Press
*Eliminadora de bolhas anéis de fundição
e resinas autopolimerizável*
Manual de Instruções

Aviso legal:

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento:

Parabéns, você acaba de adquirir o AQUA PRESS da ESSENCE DENTAL.

Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este produto oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

Termo de garantia:

Caso este produto apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de dezoito (18) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os doze (12) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra. Caso seja realizada a substituição do produto ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial válida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o produto seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do produto, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:

- Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
- O número de série no produto for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
- Na instalação do produto não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

Itens Excluídos de garantia:

- Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lamina de corte, entre outros que não caracterizam **defeito de fabricação**, independente do prazo de garantia.

Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Vazamento	Borracha de Vedação	Verifique se a borracha de vedação não está gasta ou cortada.
Não enche	Válvula injetora de ar	Trocar a válvula núcleo.
	Borracha de vedação	Verifique se a borracha de vedação não está gasta ou cortada.
		Falta da borracha de vedação.

Assistencia Técnica:

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu produto ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:
E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).
Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Características Técnicas:

Modelo: Aquapress - Eliminadora de Bolhas

Peso líquido: 1,633 kg

Peso bruto: 1,800 kg

Pressão de uso: até 20 libras

Dimensões: 250mm (diâmetro) e 225mm (altura).

Aplicação:

O Aqua Press é utilizada para a polimerização do acrílico autopolimerizável e anéis de fundição com a função de eliminar as bolhas da peça.

Características e benefícios:

- Manômetro para aferição e controle de pressão;
- Sistema rápido de abertura e fechamento da tampa;
- Válvula injetora de ar;
- Possui válvula de segurança;
- Fácil manuseio e transporte;
- Capacidade de acrilização de até três aparelhos simultaneamente;
- Pode ser usada com ou sem água;
- 18 meses de garantia para defeitos de fabricação
- Baixo custo para peças de reposição.

Componentes:



Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do produto. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

Instalação e uso inicial:

1º Passo: Instale a mangueira que acompanha o produto na sua rede de ar.

Obs: O Aqua Press não pode ser utilizada no fogo.

Funcionamento:

1º Passo - Gire o manipulô do AQUA PRESS (no sentido anti-horário), até se desprender da tampa, em seguida gire o cabo (no sentido anti-horário) e abra a tampa.



2º Passo: Prepare as peças a serem introduzida na eliminadora de bolhas. No caso de acrílico autopolimerizável é necessário introduzir água dentro da panela até que exceda aproximadamente 5 cm acima das peças.

3º Passo: Coloque a tampa, em seguida encaixe o cabo nas alças laterais e trave gire o manipulô (no sentido horário) até travar a tampa.

4º Passo: Ligue o ar e conecte o bico de ar na válvula injetora até o ponteiro do manômetro marcar 20 libras.


Obs: Nunca exceda as 20 libras de pressão.



5º Passo: Deixe aproximadamente por 20 minutos sob pressão.

6º Passo: Com o auxílio do pino para esgotar o ar aperte a válvula injetora para baixo até soltar todo o ar interno da eliminadora.

Obs: Não se deve tentar abrir a tampa da eliminadora quando a mesma ainda estiver com pressão dentro, pois poderá causar acidente ao abrir.

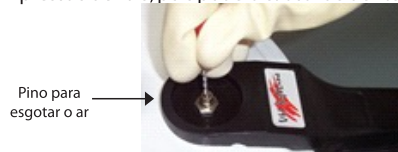

7º Passo: Gire o manipulô do AQUA PRESS (no sentido anti-horário), até se desprender da tampa, em seguida gire o cabo (no sentido anti-horário) e abra a tampa.

Conselhos:

- Não exceder em hipótese nenhuma a pressão de 20 libras.
- Antes de abrir a tampa verifique primeiro se não há pressão internamente (Nunca em hipótese nenhuma tente abrir a tampa com pressão dentro da eliminadora).
- Manter o equipamento longe de inflamáveis.
- Manter o equipamento ao menos 40 cm de fontes de calor.
- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- Manter o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

Manutenção e limpeza:

- Para realização da limpeza a mesma pode ser lavada, porém cuidado com buchas ou outro material para que não risque as carenagens. De preferência use um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool.