

de corte, entre outros que não caracterizam **defeito de fabricação**, independente do prazo de garantia.

Assistência Técnica:

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:

E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).

Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Características Técnicas:

Modelo: Bocal de Aspiração para Bancada

Peso líquido: 0,610 Kg

Peça bruta: 0,980 Kg

Fonte de Alimentação Bivolt Automático:

100 - 240VAC - 50/60Hz - 12v / 1 A

LED: 12V / 0,5A

Tensão: Bivolt Automático 100 - 240VAC

Frequência: 50/60 Hz

Dimensões: 240 mm (comprimento), 200mm (altura) e 170mm (largura)

essencedental
a essência do sorriso

CNPJ: 04.008.318/0001-70


Consulte os vídeos de cada produto e seus benefícios em nosso site - www.essencedental.com.br

Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial

CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 . 16 . 3334.2000

e-mail: essencedental@essencedental.com.br | www.essencedental.com.br

essencedental
a essência do sorriso

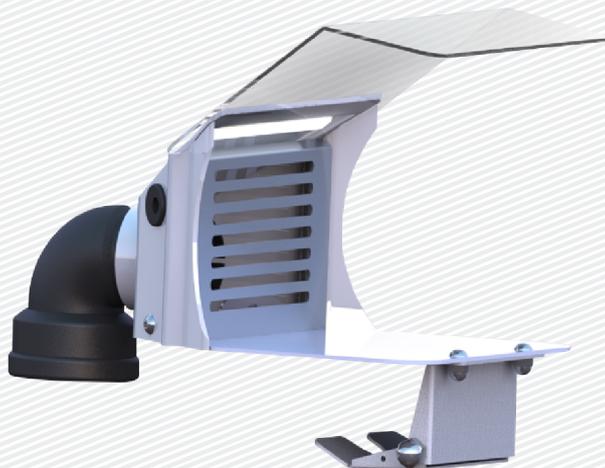

**Bocal de Aspiração para Bancada
com Iluminação**
Manual de Instruções

Agradecimento

Parabéns, você acaba de adquirir ASPIRADOR SILENCE MAXX / COMPACT da ESSENCE DENTAL.

Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Aviso legal:

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento:

Parabéns, você acaba de adquirir BOCAL DE ASPIRAÇÃO PARA BANCADA da ESSENCE DENTAL.

Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

Aplicação:

Utilizado como bocal de aspiração com acrílico de proteção e iluminação para uso em bancadas de trabalho para aspiração de resíduos.

Termos de garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.

Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial válida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:

- Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
- O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
- Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

Itens Excludentes de garantia:

- Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lamina de

Iluminação:

Coloque a fonte de alimentação na tomada e conecte o plug no conector da carenagem para ligar a iluminação LED.

Conselhos:

- Manter o equipamento longe de inflamáveis;
- Manter o equipamento ao menos 40 cm de fontes de calor;
- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos;
- Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso;
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho;
- Para desligar da tomada, puxe pelo plug da tomada e nunca pelo cabo;
- Manter o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

Manutenção e limpeza:

- Desligue o equipamento na chave e também da rede elétrica;
- Para realização da limpeza da carenagem, utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool;
- Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira.


Diagnósticos de falhas:

Falhas apresentadas	Causas prováveis	Soluções
Iluminação não funciona	Falta de energia	Verifique se na tomada tem energia
		Se o equipamento está ligado na tomada
		Verifique se o cabo energia está conectado corretamente no conector da carenagem.
Não aspira	Mangueira dobrada	Verificar se há dobras na mangueira
	Mangueira de aspiração mal conectada	Verifique a conexão da mangueira
	Mangueira entupida	Verificar se a algum objeto obstruindo a passagem de ar pela mangueira de aspiração

Características e benefícios:

- Base confeccionada em aço carbono com pintura eletrostática resistente a riscos e oxidação;
- Carenagem em Polietileno auto impacto;
- Visor em acrílico transparente;
- Pinça para fixação em qualquer tipo de bancada;
- Pode ser usado em duas posições;
- Iluminação LED;
- Conexão de mangueira com regulagem giratória na posição de saída;
- Pés de Silicone;
- Fácil troca de posição de trabalho;
- Fácil troca do visor de acrílico;
- 12 Meses de garantia para defeitos de fabricação;
- Baixo custo para peças de reposição.

Componentes:

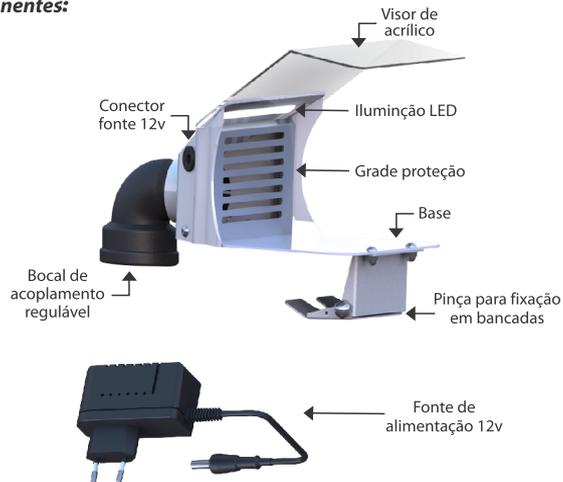

Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do equipamento, o uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.


Fotos meramente ilustrativas.

Instalação e uso inicial:


Instale a seu **BOCAL DE ASPIRAÇÃO PARA BANCADA** em uma base plana, nivelado, lisa (de modo que o equipamento fique estável para trabalhar) temperatura ambiente, ventilada, em altura adequada para o manuseio, a uma distância mínima de 40cm de fontes de calor e umidade.

Obs: O Bocal de Aspiração para Bancada é Bivolt Automático.

1° Opção: Fixado na bancada pela pinça com o bocal de aspiração de frente para o operador.

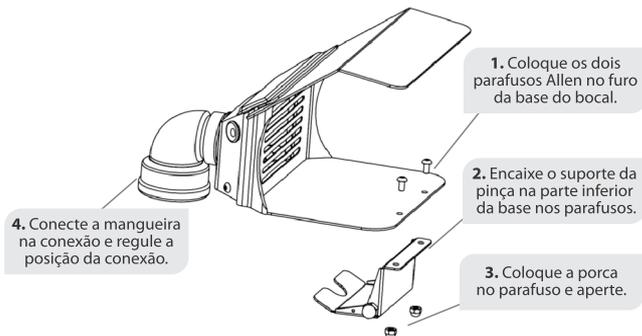

2° Opção: Fixado na bancada pela pinça o bocal de aspiração na borda da bancada.

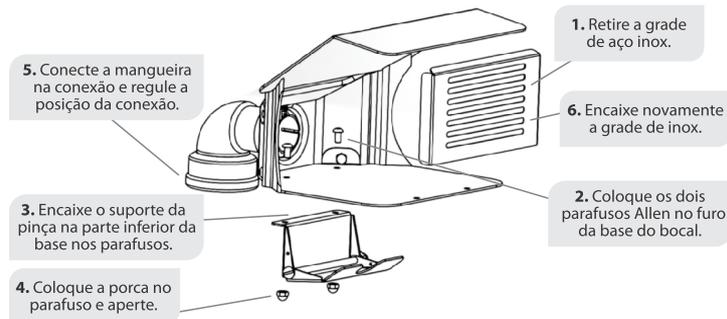

Colocação do visor de acrílico

Escolha a posição de trabalho e encaixe o visor acrílico no rasgo na lateral da carenagem.

