

essencedental
a essência do sorriso



Fabricado por:

essencedental
a essência do sorriso

CNPJ: 04.004.318/0001-70

Consulte os vídeos de cada produto e seus benefícios
em nosso site - www.essencedental.com.br

Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial
CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 . 16 . 3334.2000
e-mail: essencedental@essencedental.com.br | www.essencedental.com.br

**Desintegrador
de Agulhas**
Manual de Instruções

Aviso legal:

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento:

Parabéns, você acaba de adquirir DESINTEGRADOR DE AGULHAS da ESSENCE DENTAL.

Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

Itens Excludentes de garantia:

• Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lamina de corte, entre outros que não caracterizam defeito de fabricação, independente do prazo de garantia.

Assistência Técnica:

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:

E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).

Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Características Técnicas:

Modelo: Desintegrador de Agulhas

Peso líquido: 2,400 Kg

Peso bruto: 1,897 Kg

Tensão: 110v ou 220v – acionada por chave seletora

Frequência: 60 Hz

Potência: Saída 5 Volts x 16A / 80 Watts

Dimensões: 240mm (comprimento), 140mm (altura) e 140mm (largura).

Termos de garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.

Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial válida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:

- Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
- O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
- Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

Aplicação:

É utilizado para desintegrar agulhas com espessura de 0,35 a 1,60mm, evitando o risco de contaminação.

Características e benefícios:

- Carenagem confeccionada em poliestireno de alto impacto, designer moderno e ergonômico;
- Destruição total das agulhas, á temperatura de 1.680°C, garantindo segurança total;
- Os resíduos das agulhas (pó metálico inócuo) ficam armazenados em um recipiente, proporcionando um descarte rápido e sem contato manual;
- Elimina riscos de infecção por perfuração acidental;
- Não oferece risco de choque elétrico;
- 12 meses de garantia para defeitos de fabricação;
- Baixo custo para peças de reposição.

Componentes:



Fotos meramente ilustrativas.

Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do produto, o uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

Instalação e uso inicial:

1º passo: Instale o seu DESINTEGRADOR DE AGULHAS em uma base plana, nivelada, lisa (de modo que o equipamento fique estável para trabalhar), temperatura ambiente, ventilada, em altura adequada para o manuseio, a uma distância mínima de 40cm de fontes de calor e umidade.

2º passo: Conecte o cabo de energia, na rede elétrica. O DESINTEGRADOR DE AGULHAS está ajustado para operar em 220v para que não haja danos ao equipamento ao ser ligado em voltagem errada, verifique a voltagem correta e se houver necessidade de alterar para 110v altere a posição na chave seletora, que se encontra na traseira do equipamento.



Funcionamento:

1º Passo: Acione a chave liga/desliga (uma luz vermelha se acenderá indicando que o equipamento está ligado).

2º Passo: Introduza a agulha no orifício do lado esquerdo conforme a espessura da agulha, e faça um ligeiro movimento circular pressionando para baixo, até que a agulha se desintegre totalmente. Verifique na etiqueta do equipamento como na foto abaixo.

Obs.: A falta de movimento circular poderá ocasionar resíduos entre os contatos.

Obs.: Os resíduos das agulhas serão depositados no reservatório do equipamento.



3º passo: Retire a agulha da seringa, encaixando-a no sacador (orifício do lado direito) e em seguida gire a seringa para que a agulha se solte. Depois é só dispensá-la no mesmo orifício, deixando-a cair no reservatório de resíduos.

Conselhos:

- Manter o equipamento longe de inflamáveis;
- Manter o equipamento ao menos 40 cm de fontes de calor;
- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos;
- Desligue-o na chave e da rede elétrica quando não estiver em uso;
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho, exceto as de funcionamento do equipamento;
- Não tente transportar o equipamento sustentando-o pelo cabo de força;
- Nunca deixe o cabo encostar em a superfícies quentes;
- Para desplugar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo;
- Manter o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

Manutenção e limpeza:

- Descarte os resíduos da gaveta;
- Desligue o equipamento na chave e também da tomada para realizar qualquer manutenção ou limpeza;
- Para realização da limpeza da carenagem utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool;
- Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira.

Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Agulha não desintegra	Falta de energia	Verifique na rede elétrica tem energia
	Botão desligado	Verifique se o botão está ligado e a luz acesa
	Fusível queimado	Trocar fusível
Resíduos de agulha no contato	Movimento errado da agulha ao desintegrar	Introduza uma agulha e faça movimentos circulares. Obs.: Sempre que desintegrar faça movimentos circulares