

Assistência Técnica

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:

E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).

Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Características Técnicas

Modelo: ESPATULADOR MAXX

Capacidade da cuba: 360g

Rotação: 450 RPM

Tensão: Bivolt

Frequência: 50/60 Hz

Dimensões: 22 cm (comprimento) x 18 cm (largura) x 23 cm (altura)

Peso líquido: 8,500Kg

Peso bruto: 9,500 Kg

essencedental
a essência do sorriso

Fabricante: CNPJ: 04.008.318 / 0001-70
ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.

Hecho en BRASIL - SAC: 55-16-3334-2000 ext.301 / 302
email: sac@essencedental.com.br

essencedental
a essência do sorriso



Epatulador Maxx para Parede
Manual de Instruções

Aviso legal

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento

Parabéns, você acaba de adquirir ESPATULADOR A VACUO da ESSENCE DENTAL. Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

Aplicação

Equipamento desenvolvido para a mistura e retirada de bolhas de revestimento e gesso.

Características e benefícios

- O modelo adquirido é para ser fixado na parede.
- Fácil fixação da cuba no equipamento.
- Estrutura em aço com pintura eletrostática
- Indicador de vácuo
- Display digital com programação de 0 a 10 min. 50 seg. com intervalos de 10 em 10 segundos com sinal de áudio no final do processo
- Sistema elétrico de despressurização
- Cuba em alumínio com pintura eletrostática
- Capacidade da cuba: 360g (grande)
- Espatula em aço inox
- Rotação 450 RPM

Termos de garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.

Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial válida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:

- Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
- O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
- Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

Itens Excludentes de garantia:

• Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lamina de corte, entre outros que não caracterizam defeito de fabricação, independente do prazo de garantia.

- Não tente transportar o equipamento sustentando-o pelo cabo de força;
- Para desligar da tomada, puxe pelo plug da tomada e nunca pelo cabo;
- Nunca deixe o cabo encostar-se a superfícies quentes;
- Manter o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

Manutenção e limpeza

- Desligue o equipamento na chave e também da rede elétrica;
- Para realização da limpeza da carenagem, utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool;
- Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira.

Após a espátulação lavar a cuba e a espátula com água corrente, de preferência deixando o conjunto (cuba/espátula) montado com água.

Diagnósticos de falhas


Falha Apresentada	Causa Provável	Solução
Equipamento não funciona	Falta de energia	Verifique se na tomada tem energia
		Se o equipamento está ligado na tomada
		Verifique se o cabo energia está conectado corretamente no conector da carenagem
	Chave desligada	Acione a chave liga/desliga
	Fusível queimado	Substituição ao fusível
Não faz vácuo	Tampa não encaixa	Abrir a tampa e encaixar novamente
	Anel de vedação da tampa não esta encaixado	Retire o anel de vedação e encaixe novamente
	Anel de vedação sujo	Retire o anel lavar em água corrente e colocar novamente

- 12 Meses de garantia para defeitos de fabricação
- Baixo custo para peças de reposição

*Item opcional (vendido separadamente):

- Cuba pequena 18g
- Pedestal para uso em bancada

Componentes:

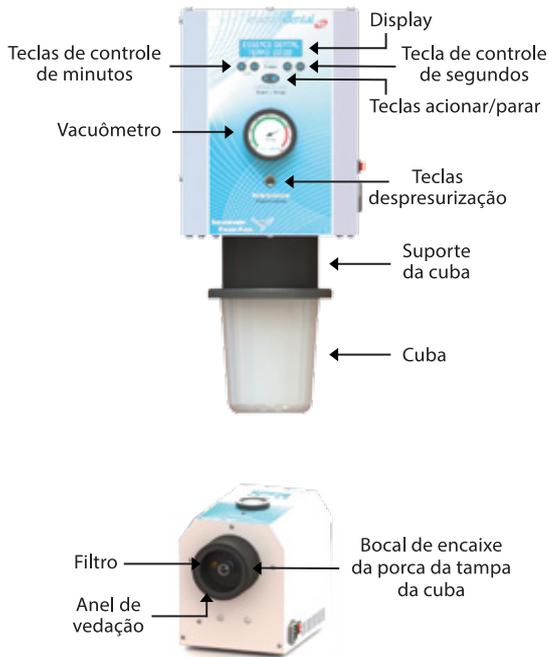



Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do produto, o uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

Instalação e uso inicial

Instale a seu **ESPATULADOR A VÁCUO** em uma base plana, nivelado, lisa (de modo que o equipamento fique estável para trabalhar), se for instalado na parede verifique se não há rede de água, esgoto, gás ou elétrica passado pela parede onde for instalado (instruções de instalação na parede em anexo) instale na altura adequada para o manuseio, a uma distância mínima de 40cm de fontes de calor e umidade.

Obs.: O Espatulador a Vácuo Essence Dental e bivolt automático.

1º Passo: Ligue o plug do cabo de energia no conector do equipamento na lateral e a tomada em uma rede elétrica.

Para conhecer o espatulador e seu funcionamento é aconselhável que se faça algumas operações vazias, produto a ser utilizado (para melhor entendimento do funcionamento).

Funcionamento

1º Passo: Ligue a chave liga desliga geral na lateral do equipamento;
2º Passo: Selecione o tempo de espatulação nas teclas referentes minutos ou segundos, o tempo vai ser indicado no display;
3º passo: Colocar a mistura a ser espatulada na cuba respeitando o limite de 360g, encaixe a tampa espatuladora sobre a cuba;
4º passo: Com umas das mãos encaixe o conjunto cuba/tampa ao suporte da cuba exerça uma leve pressão, com a outra mão pressione a tecla acionar, imediatamente tem início a espatulação e a formação de vácuo indicado no vacuômetro somente solte quando o ponteiro, atingir a parte verde do vacuômetro, a cuba fica automaticamente fixa ao seu equipamento.



Terminando o tempo, a espatulação é interrompida, um sinal sonoro será emitido, com umas das mãos segure a cuba com a outra pressione o botão despressurizar, segure a cuba/esporte até que o ponteiro esteja completamente recuado podendo assim ser retirado o conjunto cuba/espátula.

Após a espatulação lavar a cuba e a espátula com água corrente, de preferência deixando o conjunto (cuba/espátula) montado com água.

Conselhos

- Não obstrua a saída de ar do espatulador nas laterais;
- Não coloque nada sobre o espatulador;
- Manter o equipamento longe de inflamáveis;
- Manter o equipamento, ao menos 40 cm de fontes de calor;
- Nunca exceda a capacidade da cuba;
- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos;
- Desligue-o na chave e da rede elétrica quando não estiver em uso;
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho;