

Amara View

máscara facial

Instruções




Ajuste as configurações da impressora para imprimir em "Tamanho Real" ou "100%". A opção "Ajustar" deve ficar desmarcada. Confirme a impressão ao lado:

1 Dobre o final da folha na linha pontilhada;


2 Recorte o Guia de Tamanho na linha pontilhada;

3 Posicione o Guia de Tamanho na base do nariz, conforme demonstrado na figura abaixo:

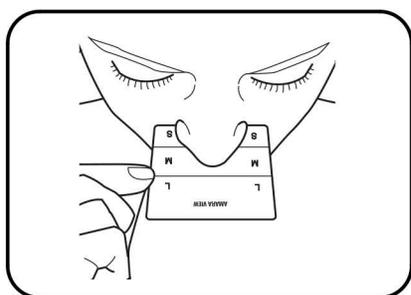


4 Determine o tamanho apropriado pela área tocada pelo nariz:
S = Pequeno | M = Médio | L = Grande

Confirme a impressão

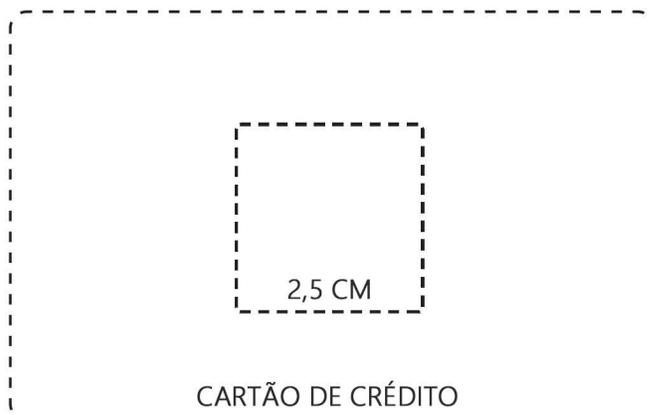

Guia de tamanho

Recorte na linha pontilhada

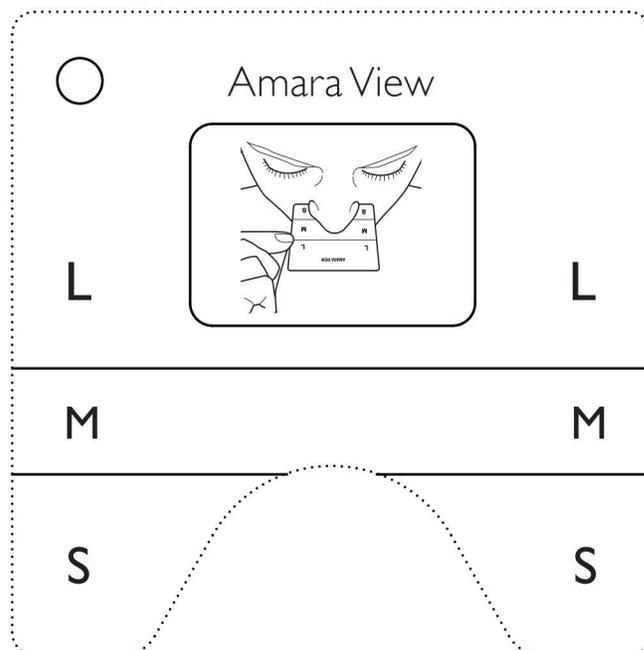

Dobre a linha pontilhada