

Fabricado por:

essencedental
a essência do sorriso

**Consulte os vídeos de cada produto e seus benefícios
em nosso site - www.essencedental.com.br**

Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial
CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 . 16 . 3334.2000
e-mail: essencedental@essencedental.com.br | www.essencedental.com.br

essencedental
a essência do sorriso



Martelete Pneumático
Manual de Instruções

Aviso legal:

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento

Parabéns, você acaba de adquirir MARTELETE PNEUMÁTICO da ESSENCE DENTAL. Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

Assistência Técnica:

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:

E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).

Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Características Técnicas:

Modelo: Martetele Pneumático

Peso líquido: 0,500 Kg

Peso bruto: 0,690 Kg

Pressão de uso: 80 a 90 lbs.

Dimensões: 50/60hz

Corpo: 115mm (comprimento) e 221mm (diâmetro).

Mangueira pedal: 2,0 metros

A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:

- Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
- O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
- Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

Itens Excludentes de garantia:

- Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalona, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lamina de corte, entre outros que não caracterizam defeito de fabricação, independente do prazo de garantia.

Aplicação:

Utilizado para separar bases metálicas dos modelos a serem transportados para o articulador e demulagem total e/ou parcial das próteses, e também como troquelizador.

Características e benefícios:

- Corpo confeccionado em alumínio, tornando o equipamento mais leve e isento de corrosão.
- Possui duas pontas, uma tipo punção (cônica) e outra tipo fenda que se adequa a qualquer tipo de remoção e abertura de muflas, diminuindo o risco de quebra da prótese quando está sendo demulada.
- Pode ser utilizado para abertura de muflas tanto de metal quanto de microondas, sem danificá-las.
- Possui arco de serra, facilitando e agilizando os processos de troquelização.
- Elimina o uso de martelo e chave de fenda entre outros instrumentos para a demulagem ou troquelização, reduzindo o risco de acidentes.
- Acompanha um "T" para instalar na rede pneumática.
- 12 meses de garantia para defeitos de fabricação;
- Baixo custo para peças de reposição

Componentes:

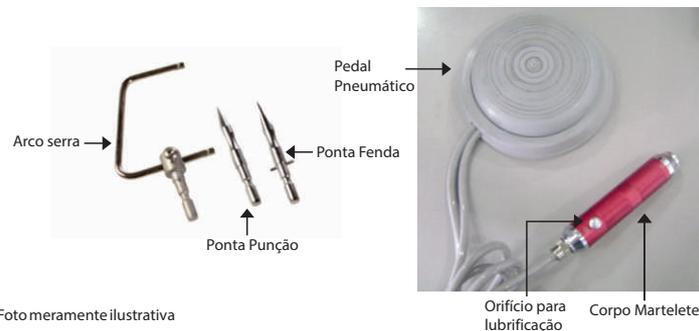


Foto meramente ilustrativa

Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do produto. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

Instalação e uso inicial:

1º passo - Interrompa a rede pneumática e conecte as pontas da mangueira nas extremidades da conexão "T" que acompanha o MARTELETE PNEUMÁTICO (para ligar o equipamento na rede pneumática, escolha previamente o local a ser instalado).

Obs.: A conexão "T" fornecida é para mangueira de Ø 1/4.

2º passo - Conecte a mangueira do MARTELETE PNEUMÁTICO no centro da conexão "T".

Funcionamento:

Demuflagem

1º passo – Escolha a ponta que irá utilizar e encaixe no MARTELETE PNEUMÁTICO.

2º passo – Acione o pedal para utilizar o MARTELETE PNEUMÁTICO.

Troquelização

1º passo – Coloque a serra no arco pressionando as pontas até encaixar os pinos da serra nos rasgos em seguida encaixe no MARTELETE PNEUMÁTICO.

Obs.: Os dentes da serra devem ficar voltados para frente do arco.

2º passo – Acione o pedal para utilizar o MARTELETE PNEUMÁTICO.

Obs.: Uso obrigatório de filtro de ar, para evitar que ocorra umidade no equipamento.

Filtro de ar não acompanha o produto.

Conselhos:

- Manter o equipamento longe de inflamáveis.
- Manter o equipamento ao menos 40 cm de fontes de calor.
- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- Nunca deixe as mangueiras encostar-se a superfícies quentes.
- Manter o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

Manutenção e limpeza:

• **Importante:** Para evitar danos ao equipamento lubrifique o MARTELETE PNEUMÁTICO antes de cada utilização no orifício indicado (oil), para isso retire o parafuso coloque três gotas de óleo lubrificante e feche o parafuso novamente.

• Para realização da limpeza utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool.

• Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira.

Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Equipamento sem força na demuflagem ou troquelização	Pressão do ar insuficiente	Regule a pressão da rede para 80 lbs.
	Falta de lubrificação	Lubrifique sempre que utilizar.
Equipamento não funciona	Sem ar comprimido na rede	Verifique o compressor e o filtro de ar.
	Mangueiras dobradas	Verifique as mangueiras e corrija.
Equipamento funcionando direto sem acionamento do pedal	Pedal com problemas	Entre em contato com assistência técnica
Vazamento	Conexões mal conectadas	Verifique o encaixe das mangueiras nas conexões.

Termos de garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.

Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial valida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.