

## Características Técnicas:

Modelo: NEGATOSCÓPIO SLIM LED

Peso líquido: 0,905 kg

Peso bruto: 1,110 kg

Tensão: 110V/220V

Frequência: 50/60Hz

Consumo: 9,6 W

Iluminação led: 1900-2200 mcd

Fonte de alimentação: 12V 1A

Dimensões: 325 mm (comprimento), 238 mm (altura) e 55 mm (largura)

Fabricado por:

**essencedental**  
*a essência do sorriso*

Consulte os vídeos de cada produto e seus benefícios  
em nosso site - [www.essencedental.com.br](http://www.essencedental.com.br)

Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial  
CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 . 16 . 3334.2000  
e-mail: [essencedental@essencedental.com.br](mailto:essencedental@essencedental.com.br) | [www.essencedental.com.br](http://www.essencedental.com.br) VERSÃO 03

# essencedental

*a essência do sorriso*



**Negatoscópio Slim Led**  
**Manual de Instruções**

VERSÃO 03

## **Aviso legal**

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

## **Agradecimento**

Parabéns, você acaba de adquirir NEGATOSCOPIO SLIM LED da ESSENCE DENTAL. Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

## **Atenção:**

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

## **Aplicação:**

Utilizado para análise e traçado de radiografias odontológicas.

## **Termos de garantia:**

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.

Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial válida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da **ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE** caso:

- Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
- O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
- Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

## **Itens Excluídos de garantia:**

- Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lâmina de corte, entre outros que não caracterizam defeito de fabricação, independente do prazo de garantia.

## Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Iluminação não liga	Falta de energia	Verifique se a tomada tem energia
	Chave liga/desliga	Verifique se a chave liga/desliga está acionada
	Fonte	Verifique se a fonte está ligada na tomada e no negatoscópio
	Led queimado	Encaminhar assistência técnica

## Assistência Técnica:

**Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.**

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:

E-mail: [sac@essencedental.com.br](mailto:sac@essencedental.com.br) (preferencialmente).

Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

## Características e benefícios:

- Dois suportes para fixação de radiografia;
- O visor é de acrílico translúcido, película em policarbonato com a superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua;
- Carenagem confeccionada em ABS, evitando o risco de choque elétrico, pois o próprio material já é um isolante;
- Iluminação a led proporcionando luz branca e homogênea em toda a superfície do visor, além de proporcionar maior durabilidade, economia de energia e acendimento instantâneo;
- Lupa Cristal com aumento de até 3,5x;
- Baixo custo para peças de reposição.

## Componentes:



Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do equipamento, o uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

### **Instalação e uso inicial:**

Instale o seu NEGATOSCOPIO SLIM LED em uma base plana, nivelada, lisa (de modo que o equipamento fique estável para trabalhar), temperatura ambiente, ventilada, em altura adequada para o manuseio, a uma distância mínima de 40cm de fontes de calor e umidade.

Ligue a fonte no NEGATOSCÓPIO SLIM LED.



E conecte a fonte na tomada da rede elétrica.

Obs.: Equipamento bivolt automático, não necessita trocar a voltagem manualmente.

### **Funcionamento:**

Acione a chave liga/desliga para utilizar o NEGATOSCÓPIO.

O mesmo pode ser utilizado das seguintes maneiras.

Em pé: Utilizado em cima de mesas, equipos, bancadas, etc.

Deitado: Possui boa angulação para traçagem, por ser ergonômico tem boa visualização sem causar stress físico;

Fixado na parede: fundo com dois orifícios para fixação.

(Obs. Os parafusos para fixação não acompanham o produto).



### **Conselhos**

- Manter o equipamento longe de inflamáveis;
- Manter o equipamento, ao menos, a 40 cm de fontes de calor;
- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos;
- Desligue-o na chave e da rede elétrica quando não estiver em uso;
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho;
- Não tente transportar o equipamento sustentando-o pelo cabo de força;
- Para desplugar da tomada, puxe pela fonte e nunca pelo cabo;
- Nunca deixe o cabo encostar – se a superfícies quentes.

### **Manutenção e limpeza**

- Desligue o equipamento da chave e da tomada para realizar qualquer manutenção ou limpeza;
- Para realização da limpeza da carenagem, utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool;
- Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira.