

essencedental
a essência do sorriso



Fabricado por:

essencedental
a essência do sorriso

CNPJ: 04.004.318/0001-70

**Consulte os vídeos de cada produto e seus benefícios
em nosso site - www.essencedental.com.br**

Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial
CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 . 16 . 3334.2000
e-mail: essencedental@essencedental.com.br | www.essencedental.com.br

Profhy Jet Gold Line
Manual de Instruções

Aviso legal:

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento:

Parabéns, você acaba de adquirir PROFHY JET GOLD LINE da ESSENCE DENTAL. Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

Itens Excluentes de garantia:

• Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lamina de corte, entre outros que não caracterizam defeito de fabricação, independente do prazo de garantia.

Assistência Técnica:

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:

E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).

Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Características Técnicas:

Modelo: PROFHY JET GOLD LINE

Peso líquido: 0,128 Kg

Peso bruto: 0,350 Kg

Pressão de uso: 35lb

Consumo de ar: 34-37 l/min

Conexão: Borden

Dimensões: 190mm (comprimento)

Termos de garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.

Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial válida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:

- Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
- O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
- Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.


Aplicação:

Desenvolvido para procedimentos de limpeza e profilaxia. Atua na remoção do biofilme não mineralizado, manchas de nicotina, resíduos de resina, etc.

Características e benefícios:

- Confeccionado em alumínio e banho de anodização, dutos em aço inox distintos para não ocasionar entupimento;
- Leve, prático designer moderno e ergonômico;
- Ponta com rotação de 360°, que facilita o jateamento em locais de difícil acesso;
- Ponta com sistema de engate rápido, autoclavável a 135°C por quinze minutos;
- Acompanha 2 hastes para limpeza dos dutos, 2 tampas acrílicas em cores diferentes extras e kit orings;
- 12 meses de garantia para defeitos de fabricação;
- Baixo custo para peças de reposição.

Componentes:

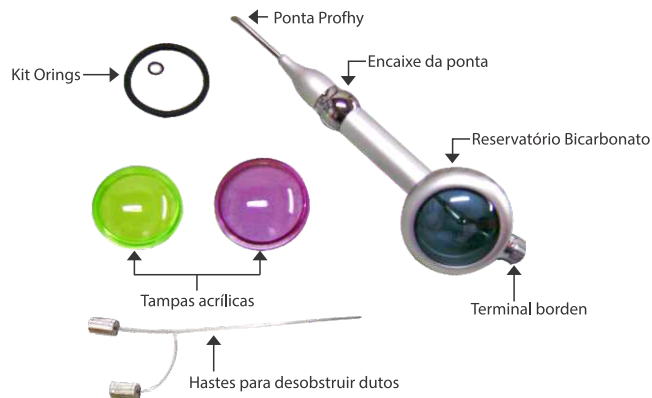

Fotos meramente ilustrativas.

Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do produto, o uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

Instalação e uso inicial:

Conecte o Profhy Jet Gold Line ao terminal (borden) de alta rotação do equipo, girando-o até o final.

Funcionamento:

1º passo: Abra a tampa do reservatório, abasteça com bicarbonato de sódio deixando o nível um pouco abaixo da rosca do reservatório, para que não haja vazamentos.

2º passo: Abra o registro de água do equipo e regule o fluxo.

3º passo: Acione o pedal do equipo para o funcionamento.

4º passo: Ao terminar o procedimento limpe o equipamento, retirando o restante de bicarbonato do reservatório, coloque a tampa acrílica de volta e acione o pedal por duas ou três vezes, até que saia água sem resíduos de bicarbonato.

A posição indicada da peça de mão para o trabalho é em ângulo de 90° entre o jato e o eixo dental, a uma distância de 2 a 3 mm da superfície a ser tratada.

5º passo: Leve a ponta em autoclave a 135°C por 15 minutos, guarde o Profhy Jet Gold Line em local seco, sem umidade.

Conselhos:

- A utilização do jato de bicarbonato é contra indicado para pessoas com complicações renais ou que estejam sendo submetidas à hemodiálise.
- A dispersão do pó de bicarbonato de sódio pode ocasionar males respiratórios.
- Os profissionais deverão utilizar luvas, máscaras e óculos de proteção durante a aplicação.
- Uso obrigatório de filtro de ar, para evitar que ocorra umidade no equipamento.
- Manter o equipamento longe de inflamáveis.
- Manter o equipamento ao menos 40 cm de fontes de calor.
- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- Manter o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

Manutenção e limpeza:

- Limpe a tampa acrílica com álcool a 70°.
- Utilize ar comprimido e seco, filtrado e isento de óleo.
- Sempre utilize água filtrada, se possível destilada.
- Não limpe o Profhy Jet com líquidos abrasivos ou solventes.
- Não coloque o Profhy Jet em cubas ultra-sônicas.
- Não utilize esterilizadores de calor seco.
- Utilizar o acessório de limpeza toda vez que o jato estiver obstruído.
- As hastas são para desobstruir os dutos sendo que a maior é para a parte da frente e a menor para a parte traseira do Profhy Jet.
- Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira.

Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Vazamento de água na peça de mão	Oring de vedação danificado	Substitua o oring compatível
	Ponta mal encaixada	Encaixe corretamente
Não sai bicarbonato de sódio	Falta de bicarbonato no reservatório	Abasteça o reservatório
	Mal conectada ao terminal (borden)	Rosqueeie devidamente o equipamento no terminal (borden)
	Dutos entupidos	Desobstrua os dutos
Vazamento bicarbonato pela tampa	Excesso de bicarbonato	Retire o excesso
	Tampa mal rosqueada	Rosqueeie corretamente a tampa
	Oring de vedação danificado	Substitua o oring compatível