

Assistência Técnica:

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:

E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).

Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Características Técnicas:

Modelo: Suporte Rolo Papel Grau Cirurgico

Peso líquido: 0,280 Kg

Peso bruto: 0,380 Kg

Dimensões: 360mm (comprimento), 75mm (altura) e 170mm (largura).

Fabricado por:

essencedental

a essência do sorriso

CNPJ: 04.004.318/0001-70

Consulte os vídeos de cada produto e seus benefícios em nosso site - www.essencedental.com.br

Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial

CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 . 16 . 3334.2000

e-mail: essencedental@essencedental.com.br | www.essencedental.com.br Versão 00

essencedental
a essência do sorriso



Suporte Rolo

Manual de Instruções

Versão 00

Aviso legal

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento

Parabéns, você acaba de adquirir SUPORTE ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO da ESSENCE DENTAL.

Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

Itens Excludentes de garantia:

- Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lamina de corte, entre outros que não caracterizam **defeito de fabricação**, independente do prazo de garantia.



Termos de garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.

Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial válida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:

- Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
- O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
- Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.


Aplicação

Para apoiar rolo de papel grau cirúrgico até 300 mm.

Características e benefícios

- Capacidade para mais de um rolo;
- Acompanha separador de rolos;
- Leve e compacta;
- Fácil de montar;
- Baixo custo para peças de reposição

Componentes:

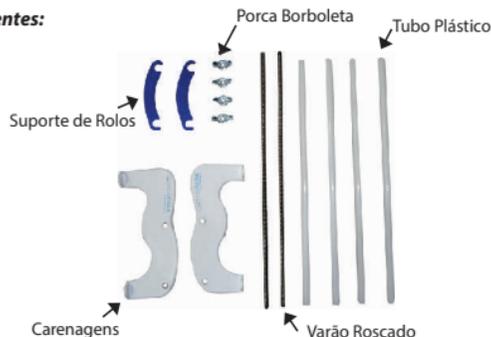

Fotos meramente ilustrativas.

Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do produto, o uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

Instalação e uso inicial

1º passo: Encaixe o varão rosado dentro do tubo plástico, deixando uma ponta para cada lado. Faça esse processo com os dois varões.



2º passo: Encaixe um dos tubos com o varão no furo central de uma das carenagens, e pelo outro lado rosqueie com porca borboleta, sem apertar somente para segurar (aproximadamente 3 voltas).



3º passo: Repita o processo anterior no furo traseiro da carenagem, ou seja, o lado oposto do logo "Essence Dental".



4º passo: Encaixe os dois tubos sem varão nos pinos de encaixe que fica na parte da frente da carenagem.



5º passo: Em seguida encaixe todos os tubos e varão na outra carenagem e rosqueie pelo lado de fora as porcas borboleta até travar.



6º passo: Coloque o rolo sobre os tubos com varão e passe o papel entre os tubos sem varão



Obs.: Se for usar mais de um rolo ou um único rolo inferior à 300 mm encaixar separador entre os rolos e nos tubos na parte traseira onde vai apoiado o rolo e que tem varão internamente.

Posicione o seu suporte de rolo preferencialmente próximo a sua seladora, em uma base plana, nivelada, lisa (de modo que o equipamento fique estável para trabalhar), temperatura ambiente, ventilada, em altura adequada para o manuseio, a uma distância mínima de 40cm de fontes de calor e umidade.

Conselhos:

- Manter o equipamento longe de inflamáveis.
- Manter o equipamento ao menos 40 cm de fontes de calor.
- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos.

Manutenção e limpeza:

- Para realização da limpeza da carenagem utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool.

Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Tubos frouxos	Porca Borboleta	Falta de aperto da porca borboleta.
	Desalinhada em relação ao pino	Verifique se o tubo está encaixado corretamente nos pinos.