

**Características Técnicas:**

**Modelo:** VIBRAMAXX

**Peso líquido:** 1,280 kg

**Peso bruto:** 1,376 kg

**Tensão:** 110V/220V – Chave seletora

**Frequência:** 50/60hz

**Potência:** 40w

**Dimensões:** 180 mm (comprimento), 140 mm (altura) e 160 mm (largura).

*essencedental*  
a essência do sorriso

CNPJ: 04.004.318/0001-70

**Consulte os vídeos de cada produto e seus benefícios  
em nosso site - [www.essencedental.com.br](http://www.essencedental.com.br)**

Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial

CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 . 16 . 3334.2000

e-mail: [essencedental@essencedental.com.br](mailto:essencedental@essencedental.com.br) | [www.essencedental.com.br](http://www.essencedental.com.br)

*essencedental*  
a essência do sorriso



**Vibramaxx**

*Manual de Instruções*

**Aviso legal:**

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

**Agradecimento:**

Parabéns, você acaba de adquirir VIBRAMAXX da ESSENCE DENTAL.

Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

**Atenção:**

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

**A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:**

- Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
- O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
- Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

**Itens Excludentes de garantia:**

- Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lamina de corte, entre outros que não caracterizam defeito de fabricação, independente do prazo de garantia.

**Assistência Técnica:**

**Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.**

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:

E-mail: [sac@essencedental.com.br](mailto:sac@essencedental.com.br) (preferencialmente).

Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

## Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Não vibra	Falta de energia	Verifique se a tomada tem energia
	Equipamento desligado	Verifique se o botão está ligado e a luz acesa
Vibra Fraco	Voltagem errada	Verifique se o equipamento foi conectado na rede elétrica 110V e a chave seletora está em 220V.
	Botão	Verifique em que posição está o botão.
Vibra forte demais	Voltagem errada	Verifique se o equipamento foi conectado na rede elétrica 220V e a chave seletora está em 110V.
	Botão	Verifique em que posição está o botão.

## Termos de garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de 12 (doze) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os 9 (nove) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.

Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial válida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

## Aplicação:

O VIBRAMAXX é utilizado para eliminar as bolhas de ar, com efeitos vibratórios nos materiais de moldagem e revestimento de gesso. Podem ser utilizados em consultórios odontológicos, consultórios médicos, laboratórios de prótese, clínicas, hospitais, etc.

## Características e benefícios:

- Carenagem confeccionada em ABS, facilitando a limpeza, pois o gesso não adere na mesma;
- Possui ventosas para fixação que eliminam qualquer ruído, vibração e movimentação, oferecendo aderência do equipamento no local de trabalho;
- Possui potenciômetro para uma melhor escolha do nível de vibração;
- Luz piloto indicadora de que o equipamento está ligado;
- Bandeja removível para facilitar a limpeza após o trabalho;
- 12 meses de garantia para defeitos de fabricação;
- Baixo custo para peças de reposição.

## Componentes:




Fotos meramente ilustrativas.

Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do equipamento, o uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

### **Instalação e uso inicial:**

Instale o seu VIBRAMAXX em uma base plana, nivelado, lisa (de modo que o equipamento fique estável para trabalhar) temperatura ambiente, ventilada, em altura adequada para o manuseio, a uma distância mínima de 40 cm de fontes de calor e umidade.

O VIBRAMAXX está ajustado para operar em 220v para que não haja danos ao equipamento ao ser ligado em voltagem errada, verifique a voltagem correta e se houver necessidade de alterar para 110v altere a posição na chave seletora, que se encontra na parte de baixo do equipamento.

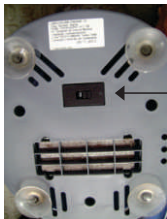

Chave seletora de potência

**Obs.: Para uma melhor aderência das ventosas, aconselhamos molhar as mesmas antes de apoiar o equipamento na bancada ou mesa.**

Ligue o VIBRAMAXX na tomada da rede elétrica.

### **Funcionamento:**

**1º Passo:** Prepare o gesso conforme instrução do fabricante do gesso.

**2º Passo:** Gire o potenciômetro até posicionar na vibração desejada que será utilizada no trabalho.

Ao girar o botão sentirá um clique e uma luz vermelha se ascenderá indicando que o equipamento está ligado.

**3º passo:** Coloque o anel ou moldeira na bandeja do VIBRAMAXX e introduza o gesso aos poucos até preencher todo o espaço.

### **Conselhos:**

- Manter o equipamento longe de inflamáveis;
- Manter o equipamento ao menos 40 cm de fontes de calor;
- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos;
- Desligue-o na chave e da rede elétrica quando não estiver em uso;
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho;
- Não tente transportar o equipamento sustentando-o pelo cabo de força;
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo;
- Nunca deixe o cabo encostar-se a superfícies quentes;
- Manter o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

### **Manutenção e limpeza:**

- Desligue o equipamento na chave e também da tomada para realizar qualquer manutenção ou limpeza;
- Para realização da limpeza da carenagem utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool;
- Para uma boa limpeza da base da bandeja, caso queira lavá-la é necessário gira-la no sentido anti-horário e ela se soltará. Já para limpeza da tampa da bandeja somente puxe-a que ela se soltará da base. Essas partes podem ser lavadas, porém antes de encaixar observe se as mesmas não estejam molhadas;
- Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira.